



EC.Steam 98.2

foglio tradizionale per test Bowie & Dick

Prima dell'uso
Before its use

no

Dopo l'uso
After its use

Test Fallito
Il colore non uniforme indica la presenza di bolle d'aria o altri problemi all'autoclave. Ripetere il test e/o richiedere l'intervento del tecnico.

Unsuccessful test
The different colour shows the presence of air leaks or problems with the autoclave. Test shall be repeated or technical intervention shall be required.

no

Dopo l'uso
After its use

Test effettuato correttamente
Il colore nero uniforme mostra una completa e regolare penetrazione del vapore saturo, ciò significa un normale funzionamento dell'autoclave e che il test è stato eseguito con successo.

Successful test
The black uniform colours shows a complete and correct penetration of saturated heat thus assuring a right working of the autoclave and a successful result.

ok

After its use



Modalità di utilizzo

Il test deve essere effettuato quotidianamente all'accensione dell'autoclave per mezzo di un pacco in teleria che abbia le dimensioni e le caratteristiche previste dalle vigenti normative, al centro del quale viene collocato il foglio di test BOWIE & DICK EC.STEAM 98.2. Le modalità di esecuzione del test sono: 210 secondi ad una temperatura di 134°C. Prodotto con carta medicale di altissima qualità.



Instructions for use

Test shall be daily carried out with a pack which size and characteristics shall be in conformity with forcing norms. In the middle of this pack BOWIE & DICK EC. STEAM 98.2 sheet is inserted. Instructions for process are the following: at 134°C for at least 210 seconds. Test is produced from the highest quality sanitary paper.

EC.STEAM 98.2